



LOTTO

DATA

PILOT STUDY KIT 14

- Sistema di raffreddamento provetta
- Tube coding system

Modalità d'uso - Procedures for use

REV. 00

- Inserire il manicotto di alluminio nel semi-guscio isolante, esercitando una pressione adeguata per il corretto fissaggio (vedi foto 1)
- Place the aluminum sleeve in the insulating half-shell, exerting an adequate pressure to fix it properly (see photo 1)



Fig. 1

- Riporre il semi-guscio isolante così preparato all'interno di una cella freezer che funzioni alla temperatura di almeno -20°C , dove dovrà rimanere per almeno 2 ore (vedi foto 2)
- Store the insulating half-shell thus prepared, inside a freezer compartment that works at -20°C at least, where it must remain not less than 2 hours (see photo 2)



Fig. 2

- Estrarre dal freezer il semi-guscio e, senza toccare il manicotto di alluminio per evitare il rischio di ustione superficiale alla pelle delle dita, causata dal metallo gelato, inserire nel minor tempo possibile dentro il foro del manicotto stesso il circuito di raccolta monouso DECCS 14 ST precedentemente preparato (vedi sequenza fotografica 3, 4 e 5)
- Remove from the freezer the half-shell and, without touching the aluminum sleeve to avoid the risk of superficial burns on the fingers' skin caused by frost, insert in the shortest possible time the disposable collection circuit DECCS 14 ST previously prepared, in the bore of the same sleeve (see the photo sequence 3, 4 and 5)



Fig. 3

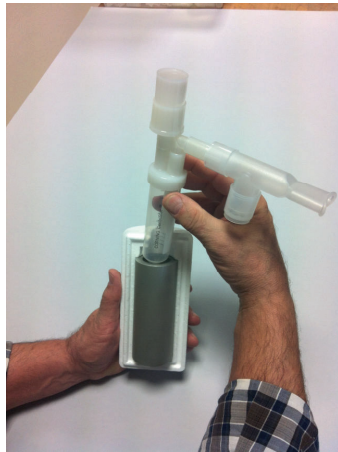


Fig. 4

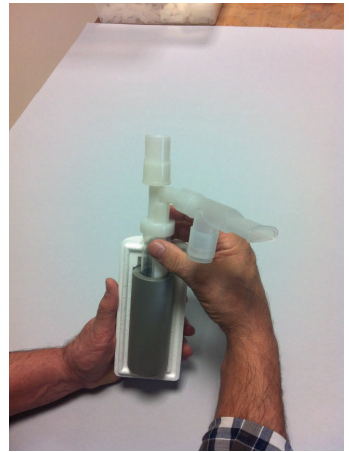


Fig. 5

- Agendo sulla parte superiore del circuito, posizionare correttamente l'insieme cilindro/circuito in modo che i connettori del tappo provetta siano inseriti nella apposita asola ricavata nel semi-guscio (vedi foto 6)
- Acting on the upper part of the circuit, place properly the assembly cylinder / circuit so that the connectors of the tube's cap is inserted in the appropriate slot obtained in the half-shell (see photo 6)



Fig. 6

- Coprire rapidamente il cilindro metallico con l'altro semi-guscio isolante, esercitando una pressione adeguata per chiudere i due semi-gusci fra di loro (vedi foto 7 e 8)
- Quickly cover the metallic sleeve with the other insulating half-shell, exerting a sufficient pressure to close the two half-shells (see picture 7 and 8)



Fig. 7



Fig. 8

- Iniziare la raccolta dell'alito esalato respirando normalmente: l'inspirazione dovrà avvenire attraverso la bocca non con il naso
- Begin collecting exhaled breath breathing normally: inspiration will take place through the mouth not from the nose